



DrySan™ Oxy Wipes

Svært effektive rengjørings- og desinfeksjonsservietter uten behov for skylning.

Duftfri formel basert på Hi-speed H_2O_2 ™-teknologi, som er kompatibel med en rekke overflater.

Ytelse er viktig ...

- ▲ Innovativ H_2O_2 -formel med bredspektret effekt
- ▲ Fjerner lukt, fett og kalk
- ▲ Kort kontakttid
- ▲ Forhåndsimpregnerte engangsservietter
- ▲ Enkle og raske å bruke
- ▲ Sparer tid: desinfiserer og rengjør i ett trinn
- ▲ Utmerket materialkompatibilitet og rengjøring
- ▲ Etterskylling ikke nødvendig

Sikkerhet er viktig ...


- ▲ Basert på Hi-speed H_2O_2 ™-teknologi
- ▲ Aktive ingredienser løses opp i vann og oksygen ved bruk
- ▲ Sikkerhet på arbeidsplassen: ikke behov for personlig verneutstyr

Bærekraft er viktig ...

- ▲ Minimal miljøpåvirkning
- ▲ 100 % fri for løsemiddel, kvaternære forbindelser, fenol og klor
- ▲ Våt, ikke-vevet blå serviett med endeløse fibre
- ▲ 100 % propylen, materiale som loer lite




.....
Rengjør og desinfiserer
opp til 60m²
.....

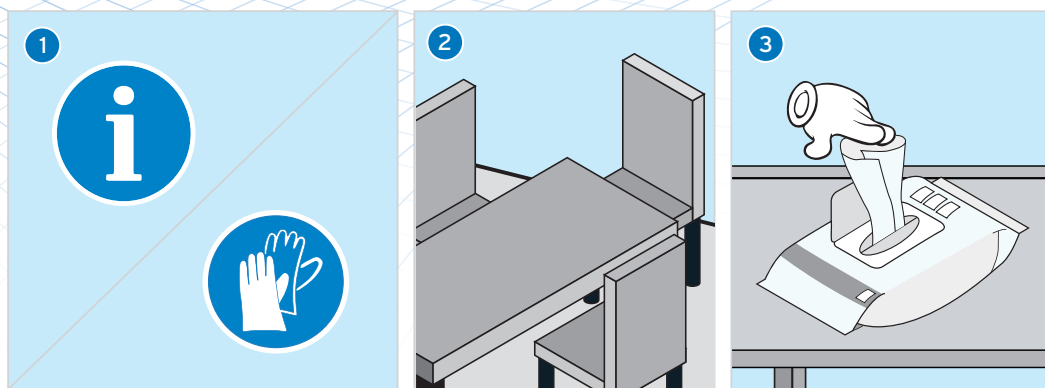


1. Sjekk hygieneplanen for detaljert brukerinformasjon. Koble fra alt elektrisk utstyr før rengjøring. Hansker anbefales av hygieniske grunner.

2. Rengjøring og desinfeksjon for en rekke overflater: bord, stoler osv.

3. Bruk DrySan Oxy Wipes til å rengjøre overflaten.

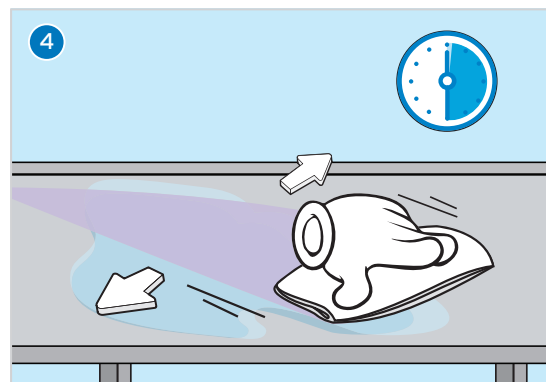

4. Gni inn overflaten slik at den er helt våt. La produktet virke i angitt kontaktid for å desinfisere overflaten. Kast servietten etter bruk.

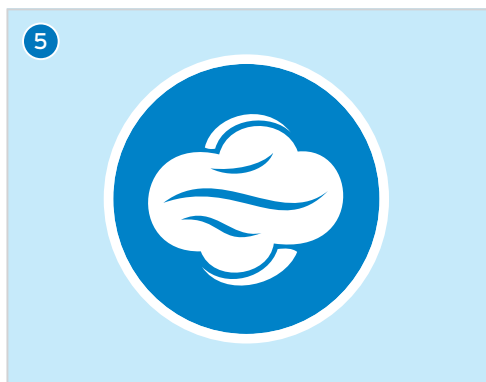

5. Etterskylling ikke nødvendig. La det lufttørke.

Europeisk standard (rene og urene forhold)	Kontaktid
EN 13727 (bakteriedrepende)	1 min.
EN 13624 (gjærdrepende)	15 min.
EN 13624 (soppdrepende)	15 min.
EN 14348 (tuberculocidal, mykobakteriedrepende)	30 min.
EN 14476 (adenovirus) urene og rene forhold	1 min.
EN 14476 (norovirus) urene forhold	60 min.
Europeisk standard 4-felts test (urene forhold)	
EN 16615 (bakteriedrepende)	5 min.
EN 16615 (gjærdrepende)	1 min.
EN 16615 (soppdrepende)	5 min.
EN 16615 (tuberculocidal, mykobakteriedrepende)	60 min.

SPESIELL INFORMASJON

- ▲ Må ikke brukes på overflater som er følsomme for oksidasjonsmidler, som marmor, kobber eller messing
- ▲ Virkestoff: 100 g inneholder 1 g hydrogenperoksid
- ▲ (CAS 7722-84-1)

SIKKERHET

- ▲ Bruk biocider på en sikker måte.
- ▲ Kun til profesjonell bruk.
- ▲ Les alltid produktinformasjonen før bruk. Se produktetikett og sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner.
- ▲ Må ikke blandes med andre produkter!
- ▲ Kun tomme og lukkede forpakninger kan kastes.

OPPBEVARING:

Produktet må oppbevares i lukket originalemballasje i temperaturer mellom 5 °C og 25 °C på et kjølig, tørt sted uten direkte sollys.

FORPAKNING

1000733 DrySan Oxy Wipes 6x160 stk

Størrelse på 1 serviett 19 x 21 cm

Globalt hovedkontor
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place,
St. Paul, MN 55102

Europeisk hovedkontor
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen, Sveits

Ecolab a.s
Postboks 6440 Etterstad
N-0605 Oslo
Telefon +47 22 68 18 00